


毛髪試料の作成方法

根元がはっきり分かれば、毛髪一本でOKです。

根元から、4-5 cm あれば、十分です。

表	住所 〒 氏名 年齢又は生年月日 TEL	裏側に2つ折りにする
	毛髪採取日（毛髪は前頭 部より採取して下さい。 難しい方は側頭部から、 お取り下さい） 備考	

毛髪を中にして2つ折りにして封筒に入れる

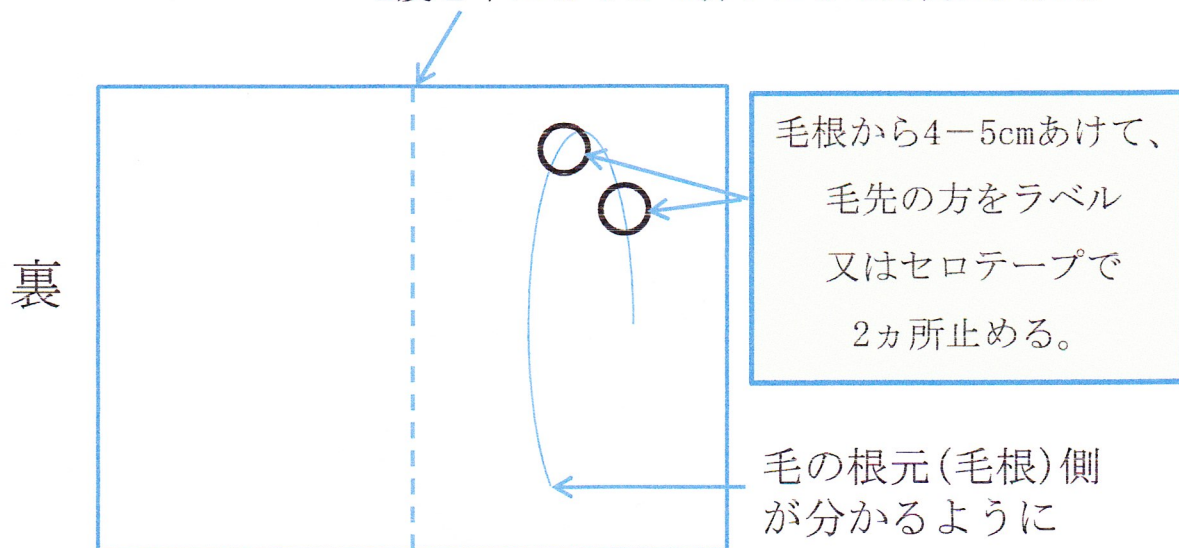

注意 1. 毛根と毛先を間違えると正確なデータが得られません。

(毛根側が分かれば、毛根ぎりぎりまで切って頂いても大丈夫です)

注意 2. 毛染めをされる方は、毛染め前の毛髪を採取して下さい。

毛染めによっては、カルシウムが付着します。